



CAT. I

Caleçon

- 1 REFERENCE 40.466
- 2 Conforme au règlement (UE) 2016/425
- 3
- 4 4. Pictogrammes d'entretien
- 5 5. À usage unique

FRANÇAIS

- 1. Référence
- 2. Marquage CE : EPI de catégorie I
- 3. Consulter les instructions d'utilisation
- 4. Pictogrammes d'entretien
- 5. À usage unique

PERFORMANCE PHYSIQUE

	Méthode de test	Résultats
Résistance à la traction	ISO 9073-3	Sens Production : 76 N Sens Travers : 44 N
Allongement à la force maximale		Sens Production : 33 % Sens Travers : 73,4 %

Domaine d'utilisation

L'accessoire est conçu pour protéger contre des risques mineurs uniquement. L'accessoire respecte les exigences des équipements de protection individuelle de catégorie I définies par le règlement (UE) 2016/425. L'accessoire est destiné à protéger le porteur contre des agressions mécaniques superficielles. Il permet de limiter la contamination dans des zones sensibles.

Limites d'utilisation

L'utilisateur sera le seul juge pour évaluer si les accessoires de protection conviennent à la situation envisagée, à la protection requise, ainsi que pour le choix et l'association des accessoires avec d'autres équipements (gants, équipement de protection respiratoire...). Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d'une utilisation inappropriée des accessoires. L'accessoire est à usage unique et doit être jeté après utilisation. L'accessoire est exclusivement pour un usage professionnel. Ne protège pas contre les risques biologiques et chimiques. Ne pas utiliser le vêtement si des défauts sont constatés (par exemple : trous, coutures endommagées,...). Matériau inflammable, tenir éloigné du feu. Utiliser le produit dans les 5 années suivant la date de fabrication.

Stockage et élimination

L'accessoire doit être conservé dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Il doit être éliminé selon la réglementation en vigueur.

Référence	Description
40.466	Caleçon blanc et opaque, élastiqué à la taille. Taille unique (52 x 40 x 32 cm)

MEDICOM SAS

Boulevard de la Chanterie - 49124 Saint Barthélemy d'Anjou - France
Email : sales.support.pro.eu@medicom.com

L'adresse internet où la déclaration de conformité est accessible est : www.medicom-eu.com

Rev00 - 27/05/2024